



Многофункциональный косметологический аппарат

Производство EunSung Global, Ю.Корея



ВОЗМОЖНОСТИ

При помощи аппарата OctoLine можно решать все основные косметологические задачи :



Лицо

- омоложение кожи

- лифтинг

- безболезненный пилинг от поверхностного до глубокого

- очищение кожи

- отбеливание

- лечение акне

- коррекция состояния постакне

- процедуры для области вокруг глаз

- безинъекционное глубокое введение косметических препаратов

Тело

- антицеллюлитные программы

- лечение растяжек

- удаление рубцов и шрамов

- улучшение тонуса кожи

- улучшение состояния кожи в области бюста, шеи и декольте

- укрепление волос

- лечение кожи волосистой части ГОЛОВЫ

Функции Apparata Octoline

JET – газожидкостная обработка кожи

Применение функции Jet:

- Массаж и лимфодренаж. Под напором мощной газожидкостной струи происходит разминание кожи, одновременно улучшается кровоснабжение кожи и усиливается лимфоотток.
- Поверхностный пилинг. Происходит отшелушивание поверхностных слоев кожи, выравнивание рельефа кожи, очищение пор. При этом кожа усиленно насыщается влагой. После процедуры кожа выглядит гладкой, бархатистой, мелкие морщинки расправляются, лифтинговый эффект сохраняется длительное время.
- Безыгольное введение различных препаратов для мезотерапии при помощи барофореза. Абсолютно безболезненно и нетравматично. Могут применяться препараты с любым молекулярным весом.
- Применение газожидкостной обработки в комплексном лечении акне.
- Применяется в программах восстановления волос
- В антицеллюлитных процедурах



Кислородно-минеральный спрей

Используется для распыления на кожу мельчайшей взвеси жидкости для усиленного проникновения. Применяется для бесконтактной обработки кожи после травматичных процедур – чистки, пилинга, лазеро- и фото- процедур, при куперозе.



Ультрафонофорез и сонофорез

- большая головка для лица или для тела
- маленькая головка – для работы вокруг глаз

Имеются предустановленные программы:

- морщины
- акне
- купероз
- фонофорез питательных веществ






Ultrasound Applicator



Ultrasound EYE

Ультразвуковой скрабер

- **Очищение** - используется для демакияжа, пилинга и мягкой чистки. Эффективно удаляет отмершие клетки рогового слоя и загрязнения.
- **Чистка пор** – используется для более глубокого очищения пористой кожи от комедонов. Подготовка и повышение восприимчивости кожи перед нанесением лечебных веществ.
- **Лифтинг** – для подтяжки кожи, микромассажа, стимуляции регенеративных процессов в коже.

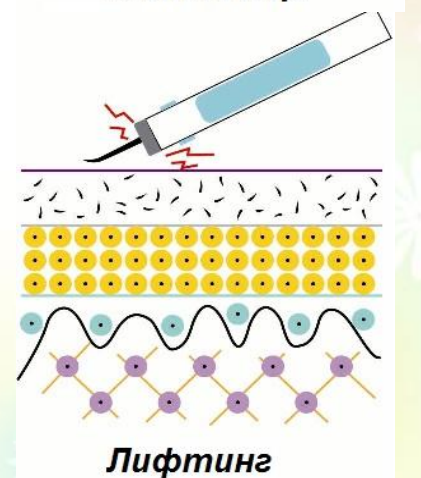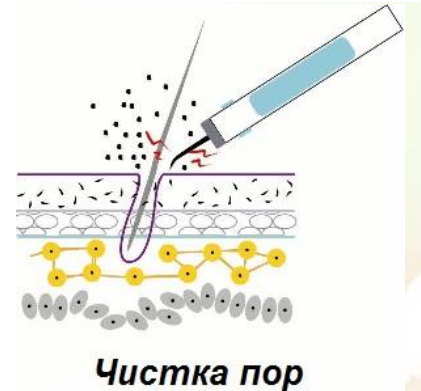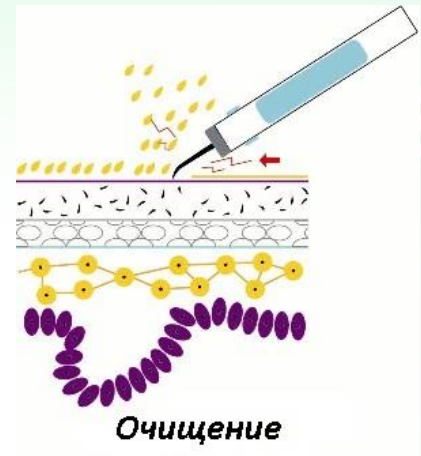

Гальвано-ионофорез

Ионофорез «+» или «- »

Используется для глубокого активного введения заряженных ампул, сывороток, витаминов.

1. Насадка с зажимом для ватного диска
2. Насадка с роликом

Микротоковый миолифтинг

Используется в программах против старения кожи для восстановления овала лица, подтяжки кожи, улучшения метаболических процессов (3). При работе по коже волосистой части головы укрепляет волосы.



1



2



3

Преимущества

Функциональность

Наличие в одном аппарате шести функций
Экономия занимаемой площади кабинета

Быстро

Обработка всего лица занимает 15-40 минут.
Высокая пропускная способность кабинета.

Безопасно

Процедура проходит без повреждения кожных покровов и абсолютно комфортна.

Отсутствие осложнений

Эффективно

Яркий лифтинг кожи сразу после процедуры, гладкость и увлажненность.

Одна из самых любимых процедур

Экономично

Расходный материал – физ.раствор (NaCl 0,9%) и препараты для ионофореза.

Низкая себестоимость процедуры

Технические характеристики

Вольтаж- 220V, 50/60Гц

Потребляемая энергия- 630W

Частота ультразвука- 3 MHz и 24KHz

Давление воздуха и жидкости - 10 Бар (~ 10
Атм.)

Вес – 40 кг

Размеры – 100 x 450 x 410 мм

Будем рады ЭКСКЛЮЗИВНОМУ сотрудничеству!

<http://kosmetolog.club/>
+7(812) 385-56-12
businessaim@gmail.com