

ВИДЫ РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА



ВАКУТЕЙНЕР С ГОЛУБОЙ КРЫШКОЙ (ЦИТРАТ Na)

- КОАГУЛОГРАММА. Взятие осуществляется на расслабленном жгуте, в последнюю очередь
- **!!! НЕ ПРИНИМАТЬ БИОМАТЕРИАЛ ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА КУРЬЕРА**



ВАКУТЕЙНЕР С СИРЕНЕВОЙ КРЫШКОЙ (ЭДТА)

- Общеклинический анализ крови, ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей), Комплексная оценка оксидативного стресса, Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6, Определение Омега-3 индекса, Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3, Витамин В1 (тиамин), Витамин В5 (пантотеновая кислота), Витамин В6 (пиридоксин), Витамин С (аскорбиновая кислота), Цинк в крови (ИСП-МС), Хром в крови (ИСП-МС), Селен в крови (ИСП-МС), Адренкортикотропный гормон плазмы (АКТГ), Определение ренина в плазме, Паратиреоидный гормон (паратгормон), В-cross Iaps, Инсулиноподобный фактор роста 1 (Соматомедин - С), Соматотропный гормон, ПЦР кровь, генетические исследования. Вальпроевая кислота/Депакин, Карamazепин/Финлепсин.
- **!!! НЕ ПРИНИМАТЬ БИОМАТЕРИАЛ ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА КУРЬЕРА**



ВАКУТЕЙНЕР С КРАСНОЙ КРЫШКОЙ (ЛИБО С ЖЕЛТОЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ГЕЛЕМ) (активатор свертываемости)

- Ферменты, Показатели липидного обмена, Показатели белкового обмена, Ревмопробы, Диагностика анемии, Показатели пигментного обмена, Кардиомаркеры, Углеводный обмен, Минеральный обмен, Жирорастворимые витамины (А, D, Е, К), Витамин А (ретинол), Витамин Е (токоферол), Витамин К (филлохинон), Гормоны щитовидной железы, Репродуктивная система, кортизол, Альдостерон, Гормоны поджелудочной железы, Кальцитонин, Остеокальцин, Маркер формирования костного матрикса P1NP, Прокальцитонин, Лептин, Гастрин, ОНКОМАРКЕРЫ, АУТОИМУННАЯ ПАТОЛОГИЯ, ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ, Сывороточный иммуноглобулин Е, А, М, G, Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Эозинофильный катионный белок, Фенобарбитал, Дигоксин, Теофиллин, Фенитоин/Дифенин, Циклоспорин, Топирамат/Топамакс, Клоназепам/Клонопин, Феназепам



ВАКУТЕЙНЕР С СЕРОЙ КРЫШКОЙ (ФТОРИД НАТРИЯ)

- Лактат
- **!!! НЕ ПРИНИМАТЬ БИОМАТЕРИАЛ ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА КУРЬЕРА**



ВАКУТЕЙНЕР С ЗЕЛЕННОЙ КРЫШКОЙ (ГЕПАРИН)

- СОД (супероксиддисмутаза), Глутатион-пероксидаза (ГТП), ПОЛ (перекисное окисление липидов), Анализ кариотипа 1 пациента, Кариотипирование с выявлением aberrаций)



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КАЛА

- КАЛ

!!! НЕ ПРИНИМАТЬ БИОМАТЕРИАЛ ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА КУРЬЕРА



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МОЧИ

- АНАЛИЗЫ МОЧИ, ГИСТОЛОГИЯ

!!! НЕ ПРИНИМАТЬ БИОМАТЕРИАЛ (моча) ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА КУРЬЕРА




ТУПФЕРЫ СО СРЕДОЙ ЭЙМСА

- Бактериологические исследования



ЭППЕНДОРФ С ТС ПРОБА РАПИД

- ПЦР на инфекции, ФЕМОФЛОР, АНДРОФЛОР

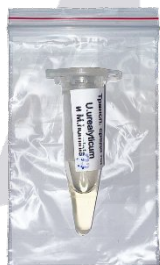

ЭППЕНДОРФ С ТС НА Mycoplasma и Ureaplasma

- Посев на Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum



ЭППЕНДОРФ С ТС НА КОВИД-19

- Определение РНК SARS-Cov-2



СТЕКЛО ПРЕДМЕТНОЕ

- Микроскопия урогенитального мазка у мужчин, женщин, Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки зева, цитологические исследования.



НАБОР ДЛЯ ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ

- Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Папаниколау



НАБОР ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ТЕСТА НА КОВИД-19

- Коронавирус, антиген (SARS-CoV-2, Ag) экспресс-тест (мазок)



СКАРИФИКАТОР И ПРОБИРКА ДЛЯ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ

- Общий анализ крови (ОАК) с лейкоцитарной формулой (капиллярная кровь)

!!! НЕ ПРИНИМАТЬ БИОМАТЕРИАЛ ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА КУРЬЕРА




ИГЛА СТЕРИЛЬНАЯ



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИГЛ



**ЗОНД УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
(ТИП А)**

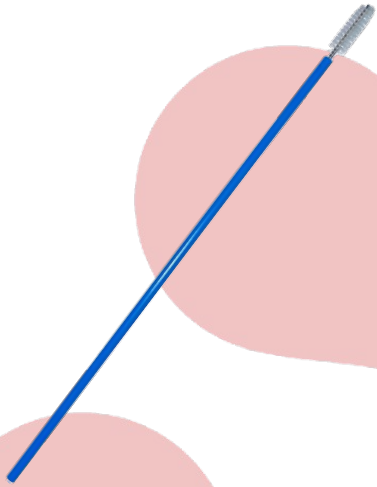

ЦИТОЩЕТКА



ЗОНД СТЕРИЛЬНЫЙ

МЕДИС

ПРИМЕЧАНИЕ



ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ. ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ. 3000 оборотов в течении 15 минут (пробирка с желтой крышкой и разделительным гелем)



ПРОБИРКУ НАПОЛНИТЬ СТРОГО ДО МЕТКИ



ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ УПАКОВАТЬ В ЗИП ПАКЕТ (ШТРИХ-КОД КЛЕИТСЯ НА ПАКЕТ)

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:

- НЕ НАРУШАТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ ЭТИКЕТОК НА ПРОБИРКЕ
- ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! ПРОБИРКУ ПЕРЕМЕШАТЬ ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ БИОМАТЕРИАЛА 7-8 РАЗ
- ШТРИХ-КОД КЛЕИТСЯ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО (ЕСЛИ НА ОДНУ ПРОБИРКУ НАДО НАКЛЕИТЬ НЕСКОЛЬКО ШТРИХ-КОДОВ – КЛЕИМ В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ)



МЕДИС

- НА ВСЕХ ПРОБИРКАХ УКАЗВАЕТСЯ ФИО
- МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МОЧИ -30 мл
- ПРИ ЗАКАЗЕ АНАЛИЗОВ НА ЦИТОЛОГИЮ И ГИСТОЛОГИЮ – ОБЯЗАТЕЛЬНО МАКСИМАЛЬНО ПОЛНО ЗАПОЛНЯЕМ БУМАЖНЫЙ БЛАНК-НАПРАВЛЕНИЕ

ЗАЯВКА СОСТАВЛЯЕТСЯ В УЧЕТОМ ПОСТОЯННОГО ЗАПАСА НА ОДНУ НЕДЕЛЮ

Заявка на предоставление расходных материалов

(на эл.почту sklad-medis@mail.ru)

« ____ » _____ 2021г.

Наименование ЛПУ _____ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Наименование	Затребовано (шт)	Выдано (шт)
Вакутейнер с сиреневой крышкой (ЭДТА)		
Вакутейнер с красной крышкой		
Вакутейнер с голубой крышкой (цитрат Na)		
Вакутейнер с зеленой крышкой (гепарин)		
Вакутейнер с серой крышкой		
Игла		
Переходник (держатель для игл)		
Контейнер для мочи нестерильный/стерильный		
Контейнер для кала нестерильный/стерильный		
Стекло предметное		
Формалин забуференный 10% (ДЛЯ ГИСТОЛОГИИ)		
Тупферы со средой Эймса, Кэрри-блэр (бакпосев)		
Проба РАПИД (эппендорф с ТС)		
Зонд уrogenитальный (тип А)		
Зонд стерильный		
Пробирка с ТС на ковид-19		
Бланк направления		
Штрих - коды		
Зип-пакет		