



MELLIGRI
эстетик групп

Hyomax[®]
Cross Linked Hyaluronic Acid





тренер

Косенюк Владимир Николаевич

Врач высшей категории,
дерматовенеролог, косметолог,
специалист по инъекционной
косметологии.

Более 15 лет общей практики.



... LABORATORIES ...
HYAMED
• GENEVA •



www.hyamax

Лаборатории Hyamed Женева

«Мы предлагаем инновационные продукты повышенной безопасности для пациентов и врачей». Лаборатории Hyamed SA расположены в Женеве, Швейцария.

Они специализируется на дизайне, производстве и распространение имплантируемых и инъекционных медицинских устройств в области пластической и эстетической хирургии, дерматологии и антивозрастной медицине.

Hyamax@crosslinked hyaluronic acid filler

Его запатентованная технология разработана многонациональной командой:

немецкие, швейцарские, французские, американские и канадские ученые и инженеры, специализирующиеся на биополимерах и инъекционных медицинских устройствах с опытом работы более 15 лет.

Система менеджмента качества Laboratories Hyamed Geneva зарегистрирована в ISO 13485, 93/42 EEC.

Миссия **Laboratories Hyamed Geneva** - разрабатывать и предоставлять безопасные и инновационные продукты для удовлетворения потребностей наших пациентов и врачей.

Безопасность и эффективность - две простые цели Лаборатории Hyamed Женева.

www.hyamax



MELLIGRI
эстетик групп


Hyomax[®] Plus

Hyomax[®] Plus Fine

Hyomax[®] Plus Deep

Hyomax[®] Plus Extra Deep



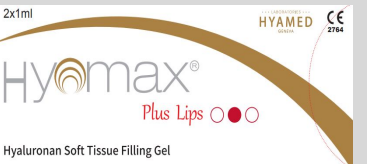


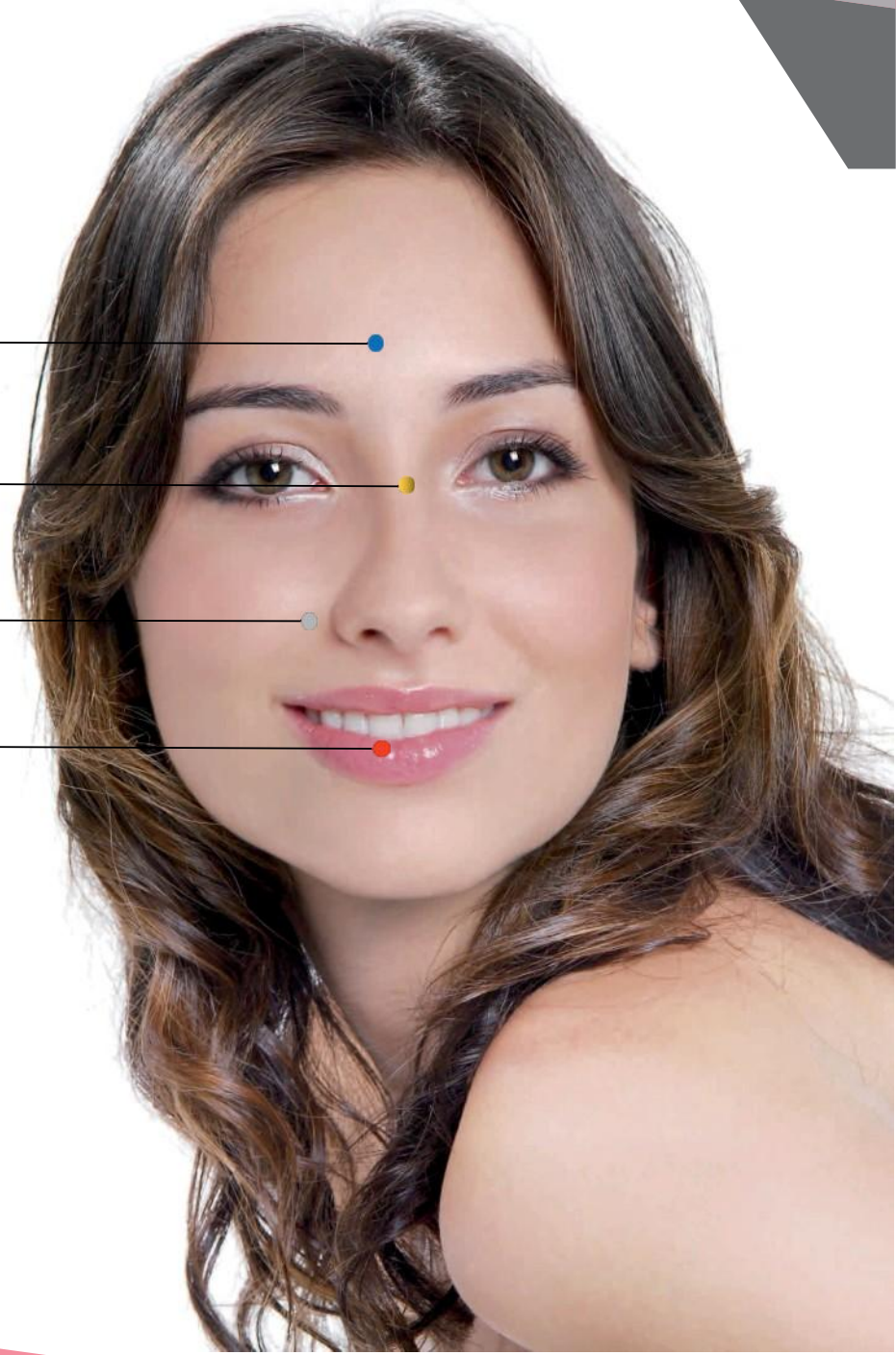


Hyomax[®] Plus Lips



CE
2764

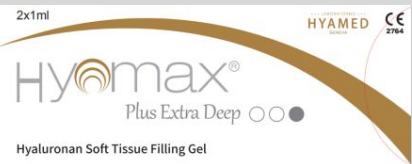





Hyomax[®] Plus CE 2764








	Hyomax [®] Plus Extra Deep 1.0	Hyomax [®] plus Deep 1.0	Hyomax [®] Plus Lips 1.0	Hyomax [®] Plus Fine 1.0
Производитель: Лаборатории Хайамед С.А.				
Концентрация	20mg/ml	20mg/ml	20mg/ml	20mg/ml
Показания	коррекция шрамов или глубоких морщин или омоложение лица	аугментация тканей лица	при дефектах губ или для увеличении объема	коррекция тонких линий и морщин или дефектов лица
Глубина инъекций				
Игла	27G	27G	27G	30G
Длительность	6-12месяцев	6-12месяцев	6-9месяцев	6-9месяцев
Маркетинг	Вышеуказанные продукты с сертификатом CE продаются в основном в Европе, России и странах бывшего Советского Союза.			

Laboratories Hyamed Group

Hyomax® филлер на основе сшитой гиалуроновой кислоты

HYAMAX® НАЗВАНИЕ	Extra Deep 2.0	Extra Deep 1.0	Deep 1.0	Lips 1.0	Contour 10.0	Volumizer 1.0
Размер иглы	27G	27G	27G	27G	27G	27G
Концентрация	25mg/ml	25mg/ml	25mg/ml	25mg/ml	25mg/ml	20mg/ml
Где инъецируется	Средне-глубокая дерма или подкожная клетчатка	Средне-глубокая дерма или подкожная клетчатка	Средняя дерма и / или поверхностный слой подкожного слоя	Средняя часть дермы Губы	Тело	Средне-глубокая дерма или подкожная клетчатка Монофазный
Вид						
Длительность	9-12месяцев	9-12месяцев	6месяцев	6месяцев	9-12месяцев	18месяцев
Маркетинг	<p>Продукция Hyomax® с маркировкой CE продается в Европе, например, в России, Нидерландах и т. д. Продукция Hyomax® без знака CE продается на Ближнем Востоке, в Южной Америке (Чили, Эквадор, Мексика и т. Д.), а также в регионах Юго-Восточной Азии, Африки и других странах, заработала хорошую репутацию на рынке и обеспечила стабильные продажи.</p>					


Hyomax[®] филлер на основе сшитой гиалуроновой кислоты

HYAMAX [®] НАЗВАНИЕ	Extra Deep 2.0 Lplus	Extra Deep 1.0 Lplus	Lips1.0 Lplus	Augmenta 2.0/1.0	Contour 10.0 Lplus
Размер иглы	27G	27G	27G	27G	27G
Концентрация	25mg/ml	25mg/ml	25mg/ml	25mg/ml	25mg/ml
Где инъецируется	Средне-глубокая дерма или подкожная ткань	Средне-глубокая дерма или подкожная ткань	Средняя часть дермы Губы	Средне-глубокая дерма или подкожная ткань	Тело
Вид					
Длительность	9-12 месяцев	9-12 месяцев	6 месяцев	9-12 месяцев	9-12 месяцев
Маркетинг	<p>Продукция Hyomax[®] с маркировкой CE продается в Европе, например, в России, Нидерландах и т. д. Продукция Hyomax[®] без знака CE продается на Ближнем Востоке, в Южной Америке (Чили, Эквадор, Мексика и т. Д.), а также в регионах Юго-Восточной Азии, Африки и других странах, заработала хорошую репутацию на рынке и обеспечила стабильные продажи.</p>				

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- склонность к формированию гипертрофических и келоидных рубцов;
- непереносимость по отношению к грамм-положительным бактериям;
- активный воспалительный или инфекционный процесс в зоне введения препарата;
- острое или хроническое кожное заболевание в стадии обострения или опасное в плане стимуляции обострения, например, герпес;
- лечения антикоагулянтами;
- аллергическая реакция на гиалуроновую кислоту в анамнезе;
- не следует вводить препарат пациентам с поливалентной аллергией;
- нельзя использовать препарат при нарушении целостности упаковки. Не подлежит повторной стерилизации;
- нельзя смешивать с другими инъекционными препаратами;
- не рекомендуется вводить препарат в области, куда ранее имплантировался перманентный недеградируемый филлер;
- клинические данные по использованию во время беременности и лактации, а также у лиц моложе 18 лет отсутствуют.

Hyamax[®] Plus **CE** 2764

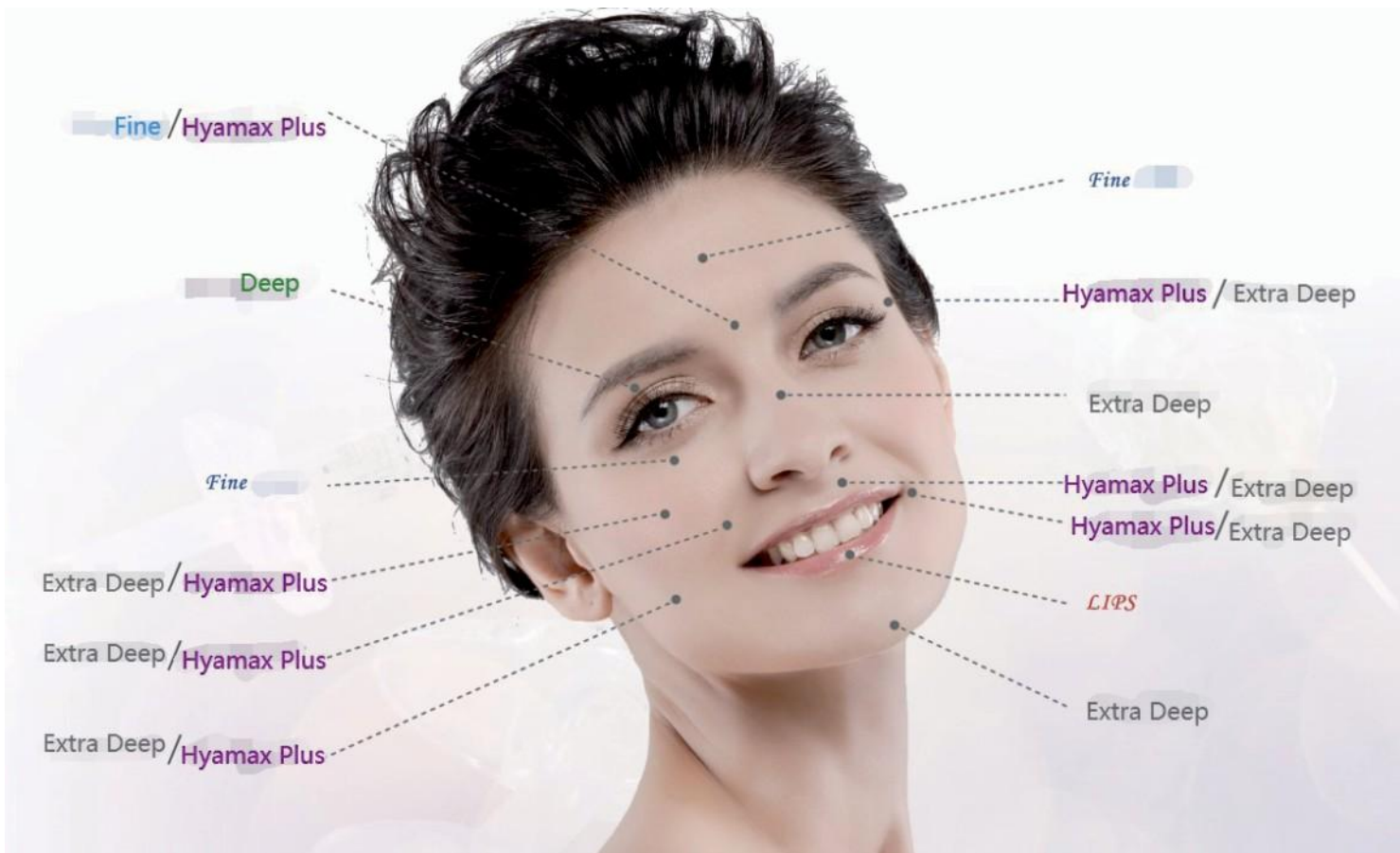


Free from animal proteins

BD syringe and needle

Fermentation technology

Safety and efficacy

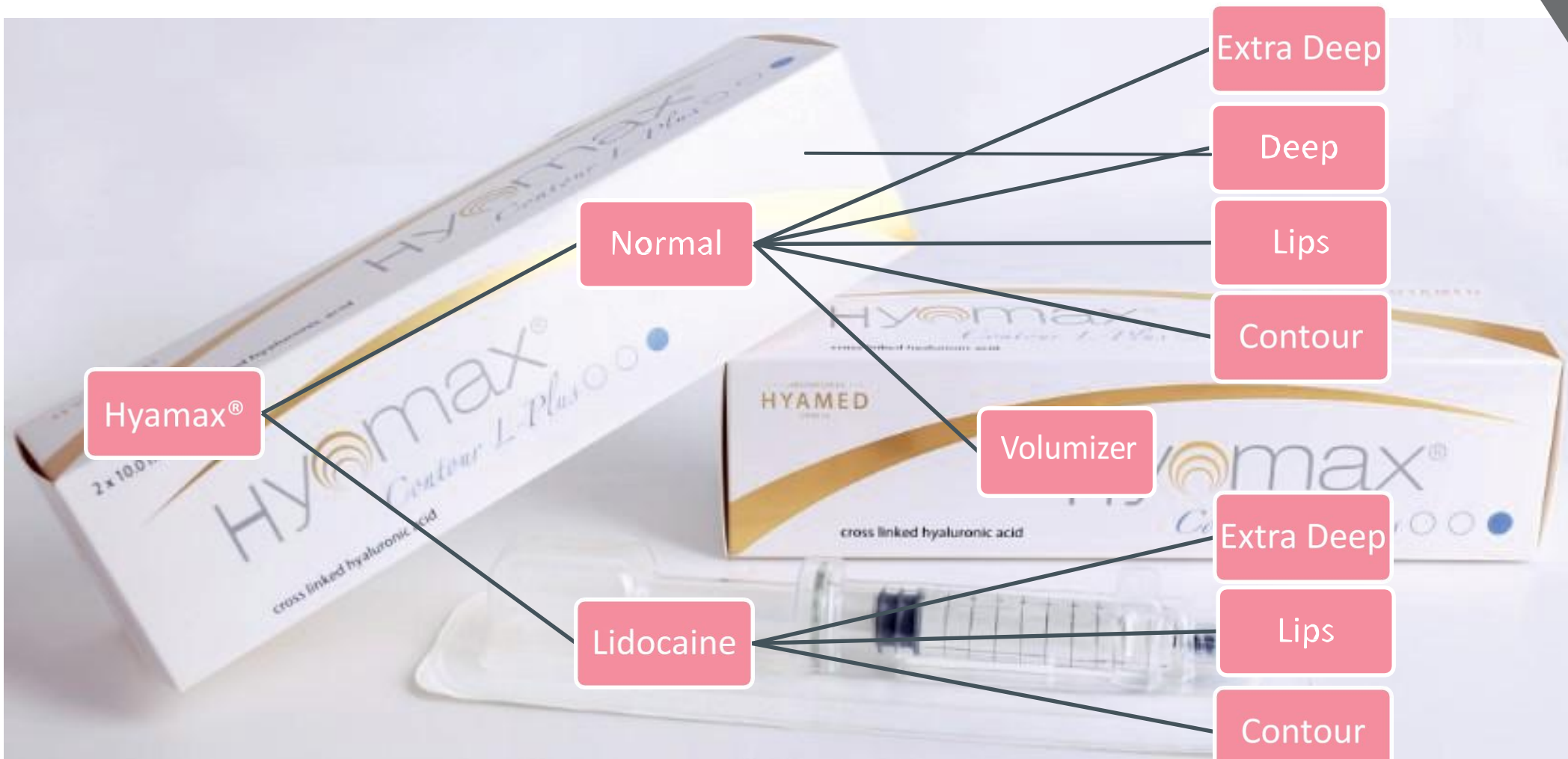

Hyomax[®]
Deep

Hyomax Deep

Концентрация ГК: 25 mg/ ml

Объем: 1 ml

Размер иглы: 27G

Инъекция: средняя дерма

Длительность эффекта: 9-12 months

Область применения:

- Коррекция ямочек подбородка
- Носогубные складки
- Носощечная борозда
- Губы (не первичные)
- Заполнение средних морщин



Hyamax Volumaizer

Концентрация ГК: 20mg/ ml

Объем: 1 ml

Размер иглы: 27G TSK

Инъекция: глубокие слои
кожи/подкожно

Длительность эффекта: 18 months

Область применения:

- Интимная пластика
- Восполнение объема бёдер
- Восполнение объемов лица
- Подбородок
- Углы нижней трети
- Скуловая зона
- Нос
- Межбровные заломы
- Заполнение глубоких морщин


Hyamax[®]
Volumizer



ДО

ПОСЛЕ

Hyomax[®] Plus Lips

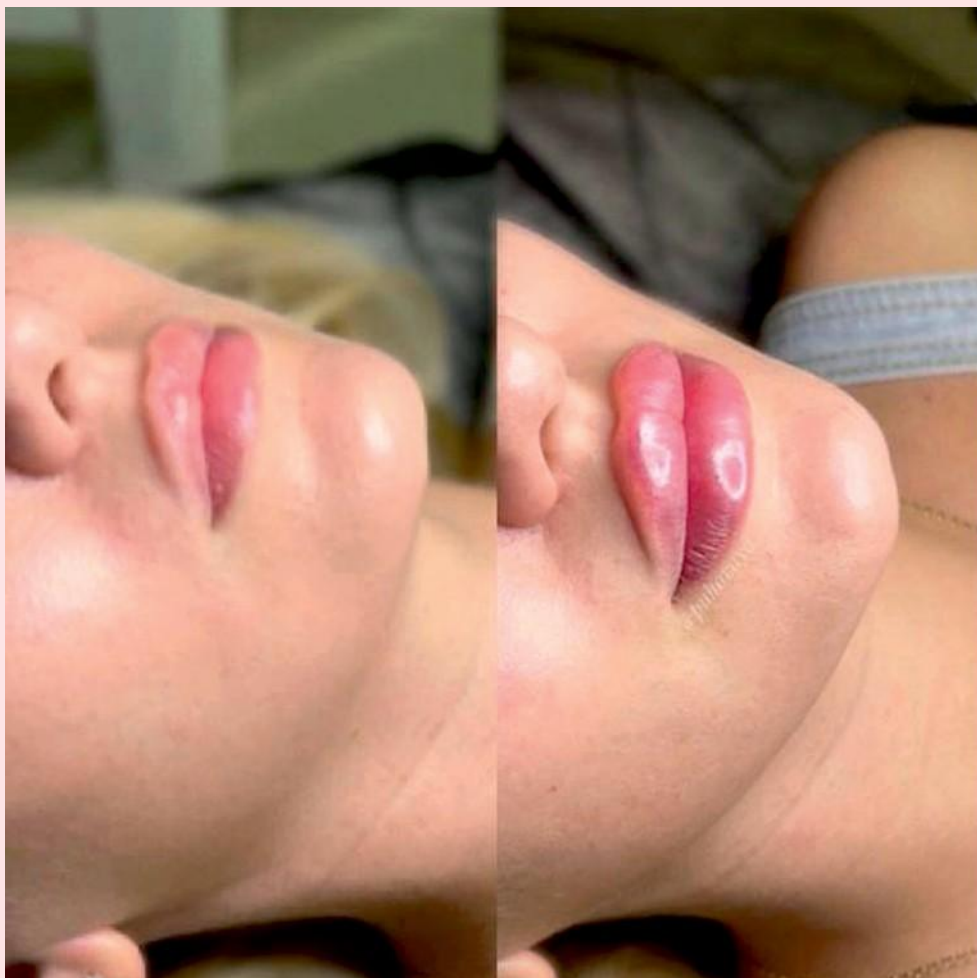

Hyamax lips

Концентрация ГК: 25 mg / ml

Объем: 1 ml

Размер иглы: 27G

Инъекция: средняя дерма

Длительность эффекта: 6 months

Область применения:

- губы
- кисетные морщины
- гусиные лапки
- формирование контура и коррекции морщин периоральной области
- формирование арки купидона
- коррекция коллон филтрума
- носослезная борозда

Hyamax[®] Plus Lips



ДО

ПОСЛЕ

Hyomax[®] Plus CE
2764
Pure



Hyamax Pure

Концентрация ГК: 20 mg/ ml
Объем: 2 ml

Размер иглы: 27G

Инъекция: Поверхностная дерма/
средняя дерма

Длительность эффекта: 9-12 months

Область применения:

- Лицо
- Шея
- Декольте
- Локти
- Колени

Hyamax[®]
Pure



ДО

ПОСЛЕ

Hy^omax[®] Plus CE
Contour 2764



Hyamax Contour

Концентрация ГК: 25mg/ ml
Объем: 10 ml

Размер иглы: 27G (в упаковке игла отсутствует)

Инъекция: глубокие слои
кожи/подкожно
Длительность эффекта: 9-12 months

Область применения:

- Интимная пластика
- Восполнение объема бёдер
- Восполнение объемов лица
- Подбородок
- Углы нижней трети
- Скуловая зона
- Для создания Full face

Hyamax[®] Plus CE 2764
Contour



ДО

ПОСЛЕ



Hyamax[®] Plus CE
2764

Extra deep



Hy^omax[®] Plus **CE 2764**

Extra deep

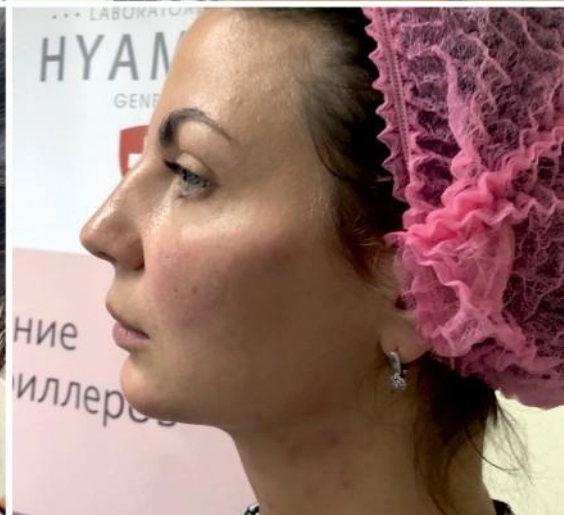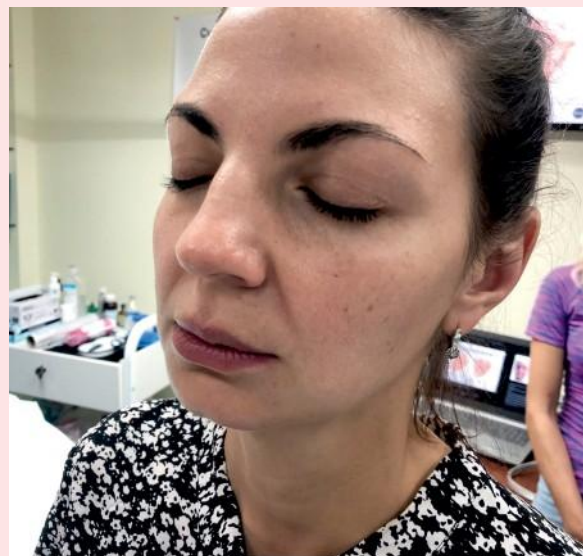

ДО

ПОСЛЕ

Hy^omax[®] Plus **CE**
2764

Extra deep



Hyamax Extra deep

Концентрация ГК: 25 mg/ml

Объем: 2 ml

Размер иглы: 27G

Инъекция: средняя дерма/ подкожно
Длительность эффекта: 9-12 months

Область применения:

- носогубных складок, уголков рта
- построения подбородка
- увеличение и коррекция объема тканей
- височная область
- средних и глубоких морщин.

Hyamax[®] Plus CE
Extra deep 2764



Hyamax Extra deep L-plus

Концентрация ГК: 25 mg/ml + 0,3 %
lidocaine

Объем: 2 ml

Размер иглы: 27G

Инъекция: средняя дерма/ подкожно

Длительность эффекта: 9-12 months

Область применения:

- носогубных складок, уголков рта
- построения подбородка
- увеличение и коррекция объема тканей
- височная область
- средних и глубоких морщин.

Hyamax[®]
Extra deep L-Plus



ДО

ПОСЛЕ

Hy^omax[®] Plus CE 2764

Augmenta



Hyamax Augmenta

Концентрация ГК: 25 mg/ ml + 0,3%
lidocaine

Объем: 1 ml
Размер иглы: 27G

Инъекция: средняя дерма

Длительность эффекта: 9-12 months

Область применения:

- губы
- носогубка
- носощечная борозда
- морщины скорби.

Hyamax[®] Plus 
Augmenta





Спасибо за внимание

